

# So nutzen Sie den Service von 3shape

**1.** Unter <https://portal.3shapecommunicate.com> melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

**2.** Klicken Sie oben auf der Seite auf „Connections“ (Verbindungen) und dann auf den Knopf „Add Connection“. (Verbindung hinzufügen)

**3.** Geben Sie „scan@oxaligner.com“ in die Suchfunktion ein und klicken Sie auf „Find“ (Suchen). Wählen Sie das Labor OX Dental GmbH aus und klicken Sie auf „Connect“ (Verbinden)

**4.** Unser Labor erhält nun Ihre Anfrage und wird diese innerhalb kürzester Zeit beantworten. Daraufhin erhalten Sie eine Bestätigung.

**5.** Nun können Sie über Ihren 3shape Scanner nachdem Sie einen Patienten gescannt haben unser Labor „OX Dental“ auswählen und die Scans direkt an uns übermitteln.

# So nutzen Sie den Service von Sirona

**1.** Unter <https://customer.connectcasecenter.com/> melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.

**2.** Wählen Sie im linken Menü unter Partner „Meine bevorzugten Empfänger“ aus. Wählen Sie „Auftragnehmer suchen“ aus und dann die Option „Direktsuche“.

**3.** Suchen Sie nach OX Dental.

**4.** Drücken Sie auf das Plus neben dem Namen und dann auf Bestätigen.

**5.** Nun können Sie über Ihren Sirona Scanner nach dem Scanprozess am Ende über den Warenkorb unser Labor auswählen und die Scans direkt zu uns schicken.



[www.oxaligner.com](http://www.oxaligner.com)  
[info@oxaligner.com](mailto:info@oxaligner.com)  
069 8700 581 50



[www.oxaligner.com](http://www.oxaligner.com)  
[info@oxaligner.com](mailto:info@oxaligner.com)  
069 8700 581 50